



黎明生物
LIMING BIO

生殖道感染诊断试剂专业生产商



同一份标本，同一次操作， 同一张检测卡，同时检测白念及滴虫

- ◆ **准确：**与湿片镜检及培养法相比，
检测白色念珠菌的敏感性为87.33%，特异性为99.26%；
检测阴道毛滴虫的敏感性为93.60%，特异性为99.17%。

与湿片镜检及培养法相比，
可克服患者就诊前阴道内局部用药对检测结果的影响。
基本没有检验人员的主观误差。

- ◆ **快速：**在15分钟之内，同时获得两种病原体的检测结果。
- ◆ **简便：**操作过程中无需任何辅助仪器设备。

StrongStep®
白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒
(乳胶免疫层析法)

www.limingbio.com

操作演示视频
请扫描二维码



产品名称	方法学	医疗器械注册证编号/产品技术要求编号	规格	标本
白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401605	20人份/盒	阴道分泌物
白色念珠菌抗原检测试剂盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401604	20人份/盒	阴道分泌物
阴道毛滴虫抗原检测试剂盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401602	20人份/盒	阴道分泌物

预期用途

白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)适用于对女性阴道分泌物拭子样本中的白色念珠菌和阴道毛滴虫抗原进行体外定性检测,用于上述病原体感染的辅助诊断。

检测原理

白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测卡中含有两根并联的检测条,采用具有高度敏感性和特异性的抗原抗体反应及免疫层析技术来定性检测临床标本中是否含有白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原。

存储条件和有效期


原包装应储存于2℃-30℃,阴凉避光干燥处,有效期24个月。切忌冷冻或在已过有效期后使用(有效期见包装袋)。

样本采集

用灭菌拭子从阴道后穹窿处取阴道分泌物。在无窥器的条件下,也可以用长拭子伸入阴道内取材。由于白色念珠菌和阴道毛滴虫在女性阴道中感染的部位相同,故所取样本可同时用于两种病原体的检测。

现场采集的样本,常温或4℃下可保存一周以上而不影响检测结果的准确性。

操作方法图示

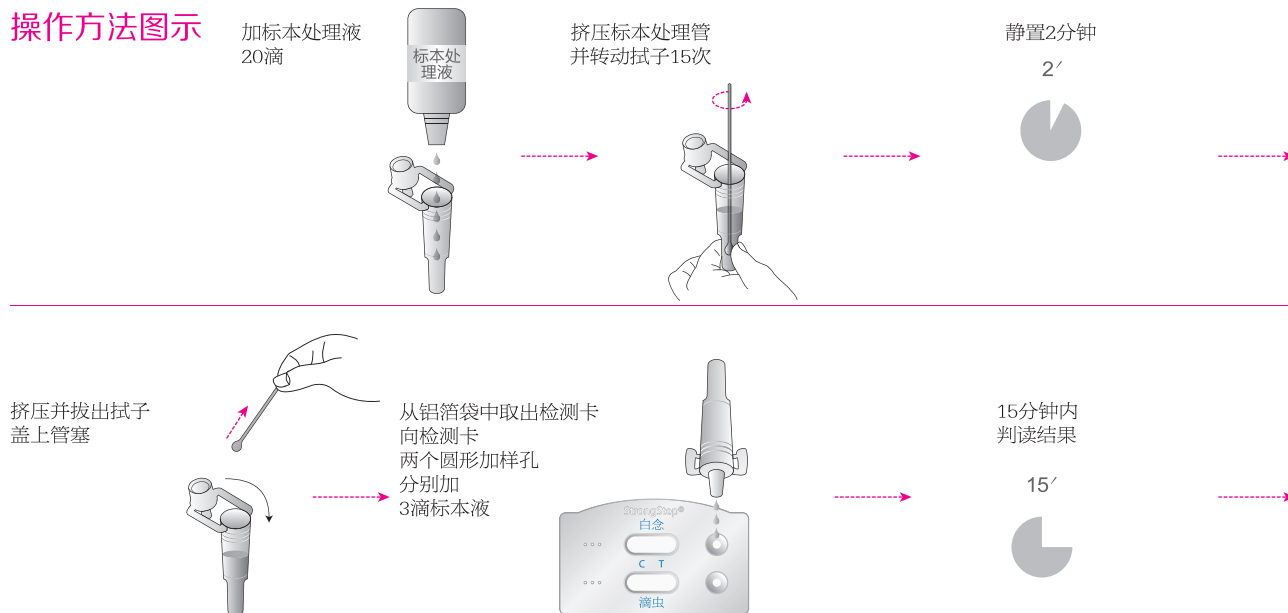

结果



白色念珠菌阴性(-)
阴道毛滴虫阴性(-)



白色念珠菌阳性(+)
阴道毛滴虫阳性(+)



白色念珠菌阳性(+)
阴道毛滴虫阴性(-)



白色念珠菌阴性(-)
阴道毛滴虫阳性(+)

注: 1、质控区C线位置未出现蓝(绿)色条带者判为无效结果。

2、便捷操作:与涂片镜检法查阴道分泌物标本共用,无需医生额外取标本。先涂片镜检完成后,在标本管中滴加10滴或500 μl 本试剂盒内所配处理液,混匀后用一次性吸管吸取标本滴加3滴到检测卡,5~10分钟判读结果即可。经大量临床验证本法检测效果和标准操作结果几乎无差别。



黎明生物
LIMING BIO

南京黎明生物制品有限公司

电话: 025-85476723 18951750358 18951750365

生产地址: 南京市玄武区花园路12号(210042)

传真: 025-85476387

网址: www.limingbio.com